

Muista CPAP-laitteen ja maskin huolto!

Säännöllinen puhdistus takaa parhaan hoitotuloksen.



Päivittäin

Maski ja ilmaletku

- Irrota ja kuivata
- Pese tyynyosa

Kostuttimen säiliö

- Vaihda vesi

Viikoittain

Maski ja ilmaletku

- Pese ja huuhtelee

Remmit

- Pese ja huuhtelee

Kostuttimen säiliö

- Pese ja kuivata

Kuukausittain

Maski ja ilmaletku

- Tarkasta kunto

CPAP-laite

- Tarkasta suodatin, vaihda tarvittaessa

Kostuttimen säiliö

- Tarkasta kunto

6 kk välein

CPAP-laite

- Vaihda suodatin

12 kk välein

Maski ja ilmaletku

- Vaihda uuteen

Kostuttimen säiliö

- Poista saostumat

24 kk välein

Kostuttimen säiliö

- Vaihda uuteen



resmedtuotteet.fi

HUOM! Pyydä tarkemmat ohjeet hoitavalta yksiköltäsi.

RESMED